

TRIO ANTICORPOS CÃO

(PARVOVIROSE/CINOMOSE/
HEPATITE INFECCIOSA CANINA)

O QUE É E PARA QUE SERVE?

Com este teste é possível **mensurar os níveis de anticorpos para cinomose, parvovirose e hepatite infecciosa canina**. Desta forma, torna-se possível organizar os protocolos de vacinação, avaliar a proteção conseguida após elas e até mesmo verificar a aquisição de anticorpos passados de mãe para filhote.

CARACTERÍSTICAS DE TESTE

ANIMAL	Cão
AMOSTRA	Soro ou Plasma
VOL. DE AMOSTRA	75µL
FAIXA DE DETECÇÃO	5 a 1000 U
TEMPO DE TESTE	10 minutos
ARMAZENAMENTO	4°C a 30° C - 24 meses



EXECUÇÃO E RESULTADOS

1
Colete **75µL** de amostra e adicione ao buffer;



2
Colete **75µL** da mistura do buffer;



3
Insira a mistura no leitor e dê **play** no equipamento;



VALORES DE REFERÊNCIA →

TRIO ANTICORPOS CÃO

(PARVOVIROSE/CINOMOSE/
HEPATITE INFECCIOSA CANINA)

CINOMOSE

DETECÇÃO	NÍVEL DO TESTE	RESULTADO
< 35 U	S1	Não imunizado ou baixa imunidade
35 – 50 U	S2	Título de anticorpos baixo
50 – 100 U	S3	Título de anticorpos médio
100 – 200 U	S4	Título de anticorpos relativamente alto
200 – 500 U	S5	Título de anticorpos alto
500 – 1000 U	S6	Título de anticorpos extremamente alto

PARVOVIROSE

DETECÇÃO	NÍVEL DO TESTE	RESULTADO
< 30 U	S1	Não imunizado ou baixa imunidade
30 – 60 U	S2	Título de anticorpos baixo
60 – 100 U	S3	Título de anticorpos médio
100 – 200 U	S4	Título de anticorpos relativamente alto
200 – 500 U	S5	Título de anticorpos alto
500 – 1000 U	S6	Título de anticorpos extremamente alto

HEPATITE INFECCIOSA CANINA

DETECÇÃO	NÍVEL DO TESTE	RESULTADO
< 30 U	S1	Não imunizado ou baixa imunidade
30 – 60 U	S2	Título de anticorpos baixo
60 – 100 U	S3	Título de anticorpos médio
100 – 200 U	S4	Título de anticorpos relativamente alto
200 – 500 U	S5	Título de anticorpos alto
500 – 1000 U	S6	Título de anticorpos extremamente alto