

CDV-Ag

(ANTÍGENO DA CINOMOSE CANINA)



O QUE É E PARA QUE SERVE?

Com este teste é possível detectar a presença do vírus da cinomose canina.

CARACTERÍSTICAS DE TESTE

ANIMAL

Cão

AMOSTRA

Secreção nasal, oral ou ocular

FAIXA DE DETECÇÃO

1-120 ng/mL

TEMPO DE TESTE

10 minutos

ARMAZENAMENTO

4°C a 30° C - 24 meses



EXECUÇÃO E RESULTADOS

1 Colete a amostra certificando-se de que o swab fique bem úmido



2 Misture a amostra no buffer;



3 Colete **75µL** da mistura do buffer;



4 Insira a mistura no leitor e dê **play** no equipamento;



VALORES DE REFERÊNCIA

DETECÇÃO	RESULTADO
0 ~ 20 ng/mL	Normal
20 ~ 30 ng/mL	Suspeita do vírus da cinomose
> 30 ng/mL	Vírus da cinomose detectado